



**Paquete de control positivo de *Neisseria gonorrhoeae* NATtrol™**  
**Número de parte: NATNG-6MC-IVD**

**USO PREVISTO:**

El control positivo de *Neisseria gonorrhoeae* (NG) NATtrol™ es un control externo de diagnóstico *in vitro* no ensayado, concebido para su uso con ensayos moleculares cualitativos para la detección de ácidos nucleicos de este organismo. El control está concebido para su uso como ayuda al diagnóstico en el sentido de que se usa para verificar el funcionamiento de los ensayos usados para detectar un estado fisiológico o patológico. El uso regular y repetitivo de los controles externos permite a los laboratorios monitorizar la variación diaria de las pruebas, el funcionamiento de los kits de ensayo lote a lote y la variación por operador individual, y puede ayudar a identificar aumentos en errores aleatorios o sistémicos. El control positivo de *Neisseria gonorrhoeae* NATtrol™ contiene microorganismos intactos y debe ejecutarse de forma idéntica a la utilizada para especímenes clínicos. Este control cualitativo no está automatizado ni tiene un valor asignado, y es responsabilidad del usuario final establecer sus propias especificaciones de referencia para el control utilizando los procedimientos moleculares de su laboratorio.

**RESUMEN DEL PRODUCTO Y EXPLICACIÓN:**

Los controles positivos de NG NATtrol™ están formulados con microorganismos purificados intactos que han sido modificados químicamente para convertirlos en no infecciosos y estables en refrigerador\*.

Cada paquete de controles positivos de NG NATtrol™ contiene 6 viales de 1,25 ml cada uno de *Neisseria gonorrhoeae* NATtrol™ formulados en una matriz de proteína purificada.

\*Pat.: <http://www.zeptometrix.com/patent-information/>

**PRINCIPIO:**

Los controles positivos de NG contienen células inactivadas de *Neisseria gonorrhoeae* mediante el proceso NATtrol™ patentado por ZeptoMetrix y están formulados en una matriz de proteína purificada propia que imita la composición de un espécimen clínico real. Se trata de controles de proceso completo diseñados para monitorizar la eficacia de la extracción, amplificación y detección en procedimientos de prueba de ácidos nucleicos. Estos controles son adecuados para su uso tanto en ensayos moleculares internos como en plataformas disponibles comercialmente.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

Aunque los controles positivos de NG NATtrol™ contienen microorganismos inactivos, deben manipularse y desecharse como si los materiales fueran potencialmente infecciosos.

Este control contiene material de origen humano y animal; el usuario deberá seguir las precauciones universales a la hora de manipular y desechar este producto. El desecho debe seguir las normativas locales, si son más estrictas que las normativas del CDC o de la FDA.

No lo pipetee utilizando la boca.

Para evitar la contaminación cruzada, utilice puntas o pipetas de transferencia distintas para todos los materiales.

No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.

El uso después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta o después de almacenarlo fuera de la temperatura recomendada puede ser perjudicial para el rendimiento o la estabilidad del producto y dar lugar a resultados no válidos o erróneos.

Si el producto se recibe deteriorado o presenta fugas, solicite instrucciones a ZeptoMetrix.

Los cambios en el aspecto físico del producto, como turbidez excesiva, presencia de precipitados o decoloración, pueden indicar la degradación o contaminación del producto. Deseche el vial.

Si no se siguen explícitamente las instrucciones del fabricante del ensayo o del kit para las pruebas y el análisis de los resultados, estos pueden dar lugar a resultados no válidos o erróneos.

Si no se obtiene el resultado esperado, póngase en contacto con ZeptoMetrix para obtener instrucciones.

**NO APTO PARA SU USO EN SERES HUMANOS:**

Estos productos NO se han concebido para emplearse en la fabricación o en el procesamiento de productos inyectables sujetos a autorización conforme a la sección 351 de la Ley sobre servicios de sanidad pública (Public Health Service Act) de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA) estadounidense ni para ningún otro producto concebido para la administración en seres humanos.

**ALMACENAMIENTO RECOMENDADO:**

Los controles positivos de NG NATtrol™ deben almacenarse a entre 2 y 8 °C a la llegada.

Si se conserva del modo indicado, los controles se pueden utilizar durante un máximo de 56 días (8 semanas) una vez abiertos.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

Agite en vórtex los viales de control positivo de NG NATtrol™ durante 10 segundos para mezclarlos.

Siga las instrucciones del fabricante para su uso como muestra clínica.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá notificarse a ZeptoMetrix y a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside el usuario o el paciente.

**LIMITACIONES:**

Los controles positivos de NG NATtrol™ son controles de diagnóstico externos *in vitro*, exentos de Clase 1 de la USA FDA, no ensayados, destinados únicamente a uso profesional.

Los controles positivos de NG NATtrol™ no están concebidos para su uso como sustituto de los controles internos proporcionados por los fabricantes de kits de diagnóstico *in vitro*.

Los controles positivos de NG NATtrol™ no están concebidos para utilizarse como material o patrón de referencia primario para ningún ensayo o procedimiento de prueba.

Los materiales de control de calidad deben utilizarse de acuerdo con los requisitos locales, estatales, federales y de acreditación.

**RESULTADOS ESPERADOS:**

Los resultados cualitativos se dan en la tabla 1 a continuación. Se proporcionan solo con fines informativos.

Como se indica en el uso previsto, este producto no tiene un valor asignado. Cada laboratorio debe evaluar cada lote de controles y establecer criterios de aceptación con su propio procedimiento de ensayo molecular específico y de acuerdo con sus propios requisitos y directrices de aseguramiento de la calidad establecidos.

La homogeneidad del producto se ha demostrado mediante estudios de validación y pruebas de control de calidad.

Tabla 1:

Ensayo	Centro	Resultados NG n = 2	
		Orina	Exudado
Cepheid Xpert® CT/NG	1	Positivo	Positivo
	2	N/A*	N/A*
BD ProbeTec™ ET CT/NG	1	N/A*	N/A*
	2	Positivo	Positivo

\*No analizado



**Paquete de control positivo de *Neisseria gonorrhoeae* NATtrol™**  
**Número de parte: NATNG-6MC-IVD**

**Características de rendimiento analítico:**

Las pruebas de precisión se realizaron en réplicas de cuatro según el ensayo de emisión final en el PNT de CC. Las pruebas de precisión se realizaron en cinco días diferentes para cada uno de los tres lotes, lo que dio lugar a pruebas que se prolongaron durante 15 días. Las pruebas fueron realizadas por tres técnicos distintos en dos instrumentos diferentes. Los criterios de aceptación para las pruebas de precisión son un resultado positivo para NG2 y NG4 de cada serie y un %CV de ≤5%.

La repetibilidad intraensayo se midió comparando los resultados de cada día de análisis para los tres lotes (Tabla 1). La reproducibilidad intraensayo se midió analizando los resultados de las pruebas de cada lote en los cinco días diferentes (Tabla 2), en cada técnico (Tabla 3) y en cada instrumento (Tabla 4).

Se realizaron pruebas de comparación del sistema de exactitud/ensayo en varias plataformas (Tabla 1 en la página 1). Los datos de las pruebas de control de calidad de la versión final se generaron en Cepheid® GeneXpert® utilizando el ensayo Xpert® CT/NG. Se realizaron ensayos adicionales en BD ProbeTec™. Se analizaron los datos de las pruebas en cada plataforma. Los criterios de aceptación para todas las pruebas de precisión fueron un resultado de NG detectado para cada lote en ambos sistemas/plataformas de ensayo.

Para todos los análisis de datos, se cumplieron todos los criterios de aceptación. Se detectó *Neisseria gonorrhoeae* y los valores de %CV fueron de ≤5 %. El control produce resultados repetibles y reproducibles que son independientes del operador y del instrumento. Todos los datos de exactitud fueron positivos, con una tasa de detección del 100 %. El control produce resultados precisos cuando se prueba utilizando un sistema/plataforma de ensayo diferente.

**Tabla 1 - Repetibilidad intraensayo**

Lote Número	Día	Media (Ct) de CT1	CT1 Desviación estándar (Ct)	%CV CT1	Media (Ct) de NG2	NG2 Desviación estándar (Ct)	%CV NG2	Media (Ct) de NG4	NG4 Desviación estándar (Ct)	%CV NG4
MD22-00017	1	0,0	0,0	0,0%	24,9	0,2	0,7%	26,2	0,1	0,4%
	2	0,0	0,0	0,0%	25,0	0,3	1,2%	26,5	0,5	1,7%
	3	0,0	0,0	0,0%	25,5	0,2	1,0%	27,7	0,4	1,5%
	4	0,0	0,0	0,0%	25,8	0,2	0,7%	28,0	0,3	1,1%
	5	0,0	0,0	0,0%	25,5	0,6	2,3%	26,9	1,0	3,7%
MD23-00075	1	0,0	0,0	0,0%	25,0	0,4	1,7%	24,7	0,4	1,6%
	2	0,0	0,0	0,0%	24,9	0,5	2,1%	24,7	0,6	2,6%
	3	0,0	0,0	0,0%	25,4	0,5	1,8%	25,6	0,4	1,7%
	4	0,0	0,0	0,0%	24,7	0,3	1,1%	24,8	0,3	1,0%
	5	0,0	0,0	0,0%	25,1	0,5	1,9%	25,0	0,3	1,2%
MD23-00156	1	0,0	0,0	0,0%	26,3	0,6	2,2%	27,3	0,7	2,4%
	2	0,0	0,0	0,0%	25,7	0,3	1,1%	26,2	0,2	0,8%
	3	0,0	0,0	0,0%	25,9	0,3	1,1%	26,9	0,3	1,2%
	4	0,0	0,0	0,0%	25,7	0,4	1,5%	26,5	0,7	2,7%
	5	0,0	0,0	0,0%	26,0	0,2	0,9%	26,9	0,5	1,8%

**Cuadro 2 - Precisión entre ensayos - por número de lote**

Lote Número	Miembro	Media de CT1 (Ct)	CT1 Desv.Est (Ct)	%CV CT1	Media de NG2 (Ct)	NG2 Desv.Est (Ct)	%CV NG2	Media de NG4 (Ct)	NG4 Desv.Est (Ct)	%CV NG4
MD22-00017	control positivo de NG NATtrol™	0,0	0,0	0,0%	25,3	0,5	1,8%	27,0	0,9	3,2%
MD23-00075	control positivo de NG NATtrol™	0,0	0,0	0,0%	25,0	0,5	1,8%	24,9	0,5	2,0%
MD23-00156	control positivo de NG NATtrol™	0,0	0,0	0,0%	25,9	0,4	1,5%	26,8	0,6	2,3%

**Tabla 3 - Precisión entre ensayos - por usuario**

Usuario (número de pruebas)	Lotes	Media de CT1 (Ct)	CT1 Desv.Est (Ct)	%CV CT1	Media de NG2 (Ct)	NG2 Desv.Est (Ct)	%CV NG2	Media de NG4 (Ct)	NG4 Desv.Est (Ct)	%CV NG4
MF (n=20)	MD23-00075, MD23-00156	0,0	0,0	0,0%	25,4	0,6	2,2%	25,7	1,0	4,1%
NG (n=20)	MD22-00017, MD23-00156	0,0	0,0	0,0%	25,8	0,5	1,8%	27,0	0,8	2,9%
ST (n=20)	MD22-00017, MD23-00075	0,0	0,0	0,0%	25,0	0,4	1,6%	26,0	1,1	4,4%

**Tabla 4 - Precisión entre ensayos - por instrumento**

Instrumento	Usuario	Número de pruebas	Media de CT1 (Ct)	CT1 Desv.Est (Ct)	%CV CT1	Media de NG2 (Ct)	NG2 Desv.Est (Ct)	%CV NG2	Media de NG4 (Ct)	NG2 Desv.Est (Ct)	%CV NG4
Inst. 1	MF, NG, & ST	n=32	0,0	0,0	0,0%	25,6	0,6	2,3%	26,5	1,2	4,7%
Inst. 2	MF, NG, & ST	n=28	0,0	0,0	0,0%	25,2	0,5	2,0%	25,9	1,0	3,7%



**Paquete de control positivo de *Neisseria gonorrhoeae* NATtrol™**  
**Número de parte: NATNG-6MC-IVD**

**LOS MATERIALES NO DEBEN UTILIZARSE EN LOS ENSAYOS SIGUIENTES:**

Hologic Gen-Probe APTIMA Combo 2® CT/NG

**ESTADO ETIOLÓGICO/PRUEBAS DE RIESGO BIOLÓGICO:**

La inactivación de los NATtrol™ se ha llevado a cabo en los materiales empleados para formular cada control y ha sido verificada además mediante la ausencia de crecimiento bacteriano en un protocolo validado de crecimiento.

La matriz de proteína purificada usada en la fabricación de este producto se ha tratado con un 0,09% de azida sódica. Se ha fabricado a partir de materiales que habían sido analizados y calificados como no reactivos a nivel de donante para el anticuerpo del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 1/2, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el anticuerpo del virus de la hepatitis C (VHC) empleando métodos de pruebas con screening de donantes con licencia de la FDA. En todos estos materiales también se analiza la presencia del VIH 1 y del VHC mediante métodos de prueba de ácidos nucleicos (NAT) aprobados por la FDA. Los materiales de origen bovino, inactivados por calor, usados en la fabricación de este producto satisfacen los requisitos aplicables del USDA en cuanto a animales provenientes de mataderos, trazabilidad y país de origen. Los materiales fueron obtenidos en establecimientos con licencia del USDA o importados legalmente de países reconocidos por el USDA con un riesgo insignificante o controlado de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y otros agentes de enfermedades exóticas. Los animales donantes se sometieron a inspección ante y post mortem en el matadero, de acuerdo con los requisitos del USDA.

**GARANTÍA DEL PRODUCTO:**

La garantía limitada del producto de ZeptoMetrix LLC y otros términos y condiciones relativas a la compra y uso de los productos de ZeptoMetrix se fijan en los Términos y condiciones de venta de ZeptoMetrix que pueden encontrarse en la página web de Zeptomatrix en [Sales Terms and Conditions](#) (Términos y condiciones de venta). Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Zeptomatrix en la dirección de correo electrónico [diagnostic.cs@zeptometrix.com](mailto:diagnostic.cs@zeptometrix.com).

**EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

ZeptoMetrix LLC niega toda responsabilidad y garantía con respecto a este documento y a la información en él contenida, explícita o implícita, incluidas entre otras aquellas de comercialización, adecuación para un propósito en particular o ausencia de infracción. Hasta el máximo grado permitido por la ley, en ningún caso ZeptoMetrix LLC será responsable de ningún contrato, delito, garantía, daño consecuencial o pérdida de beneficios relacionados con o provocados por este documento o la información en él contenida, incluidos entre otros el uso del mismo, incluso si ZeptoMetrix ha sido alertada de la posibilidad de que se provocaran tales daños.

**LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS DE ETIQUETADO:**

	Fabricante		Limitación de temperatura
	Uso diagnóstico <i>in vitro</i>		Fecha de caducidad
	Marca europea de conformidad		Riesgo biológico
	Número de catálogo		Representante autorizado
	Código de lote		Consulte las instrucciones de uso
	Contiene material biológico de origen animal		Contiene material biológico de origen humano
	Identificador único de dispositivo		Marca de conformidad UKCA

Fabricante:  
 ZeptoMetrix LLC  
 25 Kenwood Circle  
 Franklin, MA 02038, USA

Representante en la CE:



EMERGO EUROPE  
 Westervoortsewijk 60  
 6827 AT, Arnhem  
 Países Bajos

Persona responsable en el Reino Unido:  
**Emργο Consulting (UK) Limited**  
 c/o Cr360 – UL International,  
 Compass House, Vision Park Histon,  
 Cambridge CB24 9BZ, Reino Unido

**HISTORIAL DE REVISIONES.**

Nivel de revisión	Descripción de las revisiones
10	Se ha añadido una declaración adicional a la advertencia sobre el uso después de la fecha de caducidad mostrada en la etiqueta o después de la conservación fuera de la temperatura recomendada, los cambios en el aspecto físico del producto, el incumplimiento explícito de las instrucciones del fabricante del ensayo o del kit, y qué hacer si no se obtiene el resultado esperado. Se ha añadido «Los controles positivos de NG NATtrol™ no están concebidos para utilizarse como material o patrón de referencia primario para ningún ensayo o procedimiento de prueba» a las limitaciones. Se ha añadido «Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá notificarse a ZeptoMetrix y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente» a las instrucciones de uso. Se ha añadido texto al uso previsto para indicar que se trata de un control cualitativo que no está automatizado. El uso previsto fundamental no ha cambiado. Se ha añadido la sección Historial de revisiones. Cambios en respuesta a la revisión del archivo técnico de BSI para el cumplimiento del IVDR. Se han añadido símbolos biológicos y de UDI. Se ha actualizado la dirección del representante en la CE de Emργο Europe a la nueva ubicación. Se han añadido los datos de contacto de la persona responsable en el Reino Unido.
11	Adición Marca de conformidad UKCA.
12	Correo electrónico del Servicio de Atención al Cliente actualizado. Añadidas características analíticas de rendimiento según DC-23-005.